

FLAT

X-Ray 自動現像機用処理液

*Processing solution collections for
developmental automatic operation
machines*

- 使いやすい！ 一液タイプで作業が非常に簡単
- 高い品質！ ハイクオリティ画質を追求しました
- 豊富な種類！ 各種現像機にあわせてお使いいただけます
- 環境に優しい！ パウチ袋の採用でゴミの減量化に役立ちます




FR-D&F



(X-Ray自動現像機用現像液&定着液)

品名	入り数(箱)	医院価格
FR-D&F	3リットル用×3	15,000円
FR-D&F	1.5リットル用×4	12,000円
FR-D(現像液)	2リットル用×4	8,000円
FR-F(定着液)	2リットル用×4	7,000円

溶解方法

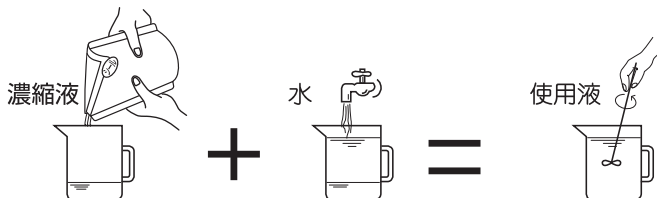

(例) 3リットル用製品の場合
濃縮液1袋(1リットル) + 水2リットル = 使用液3リットル


スーパークリーン

(X-Ray自動現像機用洗浄液)



品名	入り数(箱)	医院価格
スーパークリーン	3袋入り	5,400円

溶解方法

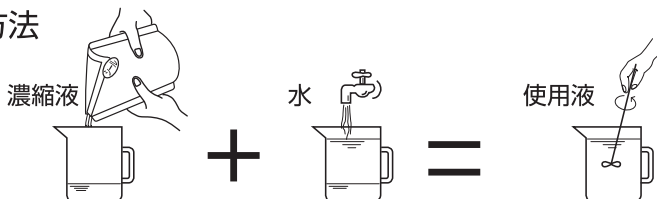

濃縮液1袋 + 水(使用機種に合わせて希釈してください) = 使用液
※スーパークリーン使用に関しては、使用方法をご確認の上正しくご使用ください。


RTU-D&F

(使用液タイプ現像液&定着液)



品名	入り数(箱)	医院価格
RTU-D&F	1リットル×3	5,000円

溶解方法

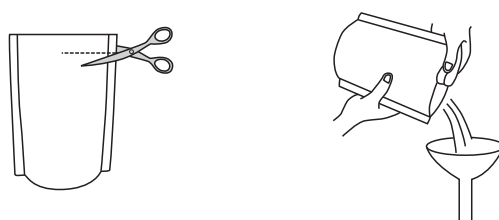

使用液タイプです。希釈せず使用して下さい。

注意事項

- 攪拌が不十分ですと十分な現像処理が行えません。充分攪拌してお使いください。
- 寒冷時には結晶が生じる場合があります。容器ごとお湯(約50℃)につけ溶解してお使いください。
- 眼に入った時や、皮膚に付いた時は、直ちに流水で15分以上洗浄し、異常を感じたら速やかに医師の診療を受けてください。

◆ 改良の為、仕様、外観の一部を変更することがあります。

取扱店

株式会社 コラット

本社 〒658-0023 神戸市東灘区深江浜町141-4 仙台営業所 〒981-3215 仙台市泉区北中山1-1-23
TEL 078(412)2345代 FAX 078(412)2028 TEL 022(376)8020代 FAX 022(376)8021
東京営業所 〒123-0862 東京都足立区血沼2-13-13 工場 〒679-4346 兵庫県たつの市新宮町千本1832
TEL 03(3857)9271代 FAX 03(3857)9272 TEL 0791(75)3146代 FAX 0791(75)4420

— <http://www.k-flat.co.jp> —