

パノラマ撮影用マウスピース

スマートピース



クラス I 医療機器届出番号 28B3X00009000044


感染症リスクを軽減！

簡単に撮影できて、スタッフさんも患者さんも安心！

日本製

医療用
シリコン

やわらか
素材

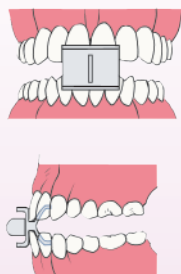

ワンサイズのみ 1箱 120個入 希望小売価格 **¥4,800** (税込 ¥5,280)


患者さんにかんでもらうだけで、パノラマ撮影時の、上下顎歯列の位置合わせ、クリアランス設定が簡単にできるマウスピースです。

頭部の向きの微調整がしやすいので、迅速にきれいな画像を得ることができます。


ディスプレイで、唾液も付着しにくくなりますので、衛生的に安心してご使用いただけます。

センタリングガイドが
持手になるので、唾液が
つきにくく、衛生的！

歯列に合わせた
カーブで違和感なく
かんたん設定！

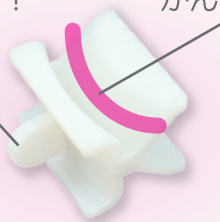

非常にやわらかい素材です！

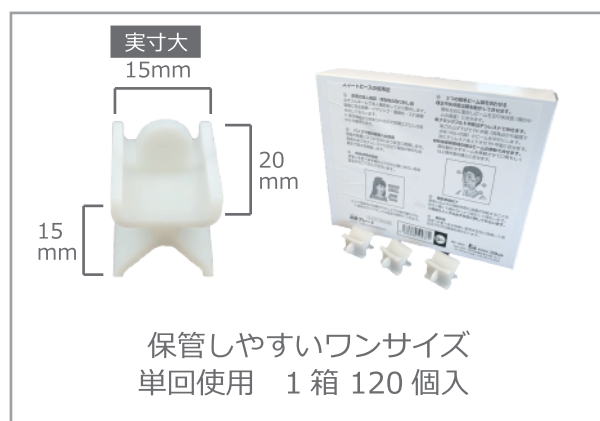

保管しやすいワンサイズ
単回使用 1箱 120個入

ご使用の際は、添付文書を必ずご確認ください 改良のため、予告なく製品仕様・パッケージの変更を行う場合があります

WEBで製品を紹介しています！ぜひご確認ください！

製造販売元



株式会社 フラット

本社 〒658-0023 神戸市東灘区深江浜町141-4

TEL 078-412-2345 FAX 078-412-2028

東京営業所 TEL 03-3857-9271(代) FAX 03-3857-9272

仙台営業所 TEL 022-376-8020(代) FAX 022-376-8021



お問合せ


スマートピース 120個入/箱



4 580280 509869


スマートピースの使用方法

I パノラマ撮影装置への誘導

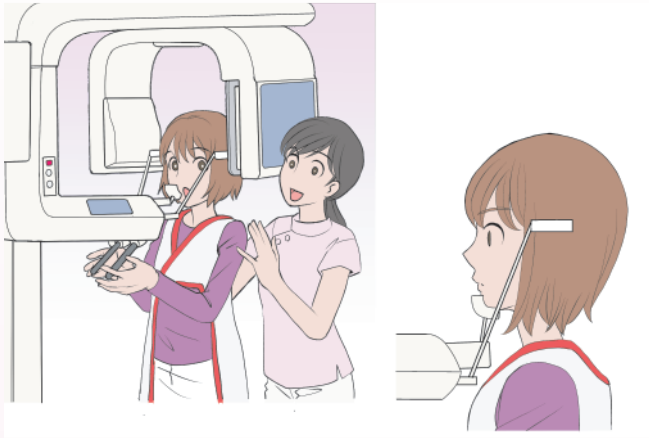

フルネームで本人確認を行ってから、眼鏡・アクセサリ・入れ歯等を外してもらいます。
X線は、背面から照射されるので、防護衣は背中から着用してもらいます。
患者さんが**装置にぶつからないように**、安全に誘導します。


II スマートピースの設定

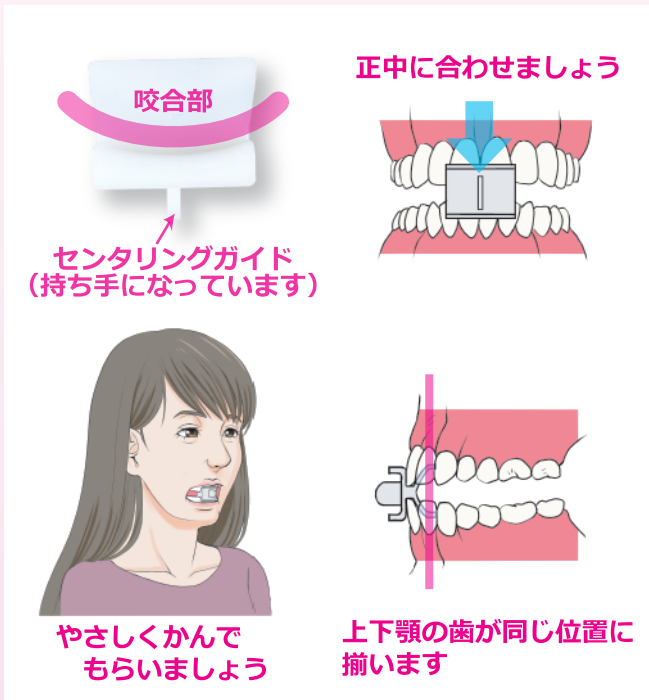

スマートピースを顔の上下の中心線に合わせ、咬合部をやさしくかんでもらいます。

- ※スマートピースをかむだけで、上下顎歯列の位置合わせ、上下の歯の適度なクリアランスの設定が瞬時にできます。
- ※センターの突起をつまむので、設定時に指が汚れません。
- ※ディスプレイなので、衛生管理の手間が省けます。

III 3つのビームを合わせる (非常に重要です)

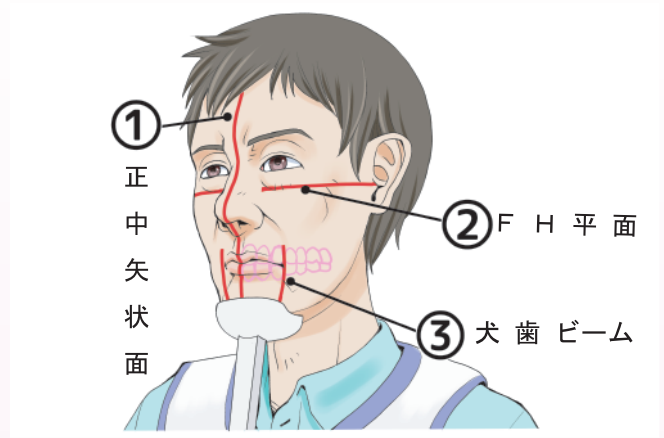

- ① **顔を左右に動かし**、ビームを正中矢状面（顔の中心を左右に分ける垂直面）に合わせます。
- ② フランクフルト（FH）平面（耳珠点から眼窩下点をつないだ線）は、**あごの上げ下げ**で、ビームと平行にします。次に背筋がまっすぐになるまで、チンレストを上昇させながら、FH平面に合わせます。
- ③ 犬歯ビームは、顔は動かさずに、**ビームを移動させて**、犬歯の遠心（口角・犬歯と小臼歯の間位）に合わせます。

※背筋がまっすぐでない場合、頸椎が映り込む場合があります。
※①と②はまっすぐに正面を向いた位置と考えてください。
※L型の咬合バーに比べ、**顔の前後左右の微調整が容易なので、迅速に最適な位置の調整が出来ます。**

IV 撮影準備完了



患者さんが**驚いて動かないように**、装置が回転することを伝えてから、退出します。

照射スイッチは、必ず、先生に押してもらいます。
撮影後は、スマートピースを廃棄し、患者さんを、次の移動先に誘導します。

使用上の注意

この製品はディスプレイ（単回使用）です。再使用はお控えください。
誤飲した場合は、速やかに吐き出させるなどの処置を行ってください。（材質に毒性はありません。）