


歯科用X線ビームアラインメント装置

マルチアングルインジケーター

大人も子供も全部位撮影可能！
 コンパクトに収納できます！
 かんたんで衛生的な撮影！

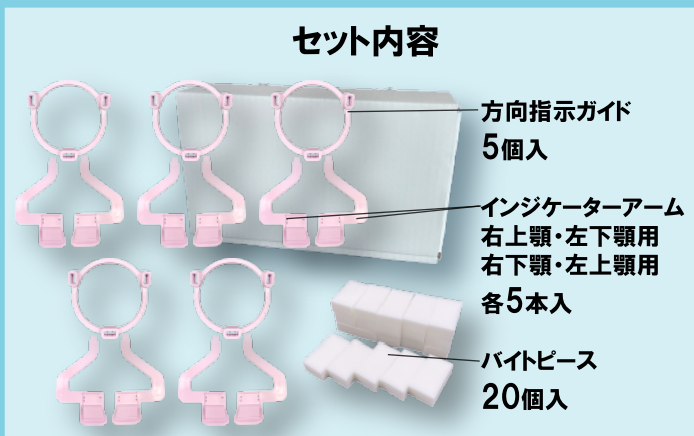

1ケース 5セット入

8,000 円(税込8,800円)

希望小売価格

POINT → 大人も子供も全部位撮影可能！



1セットで成人から小児まで全部位が撮影可能です。
 5セット入(1セットあたり1,600円)なので、
 連続の撮影にも対応でき、数量管理もかんたん！
 フィルム、IPのサイズは、#2・#1・#0に対応！

POINT → コンパクトに収納できます！



リングが取り外せるセパレート式ですので、滅菌時も
 保管時もコンパクトに収納できます！
 Lサイズ(100mm幅)の滅菌ロールに封入可能！
 リング付の半分以下の厚みで保管時もすっきり！

POINT → かんたんで衛生的な撮影！



前歯・臼歯でも
 スレにくく
 設定しやすい
 アーチ形状

噛むだけでかんたんに設定完了！
 患者様もスタッフ様も口腔内に深く指を入れないので、
 唾液や血液との接触機会、量が減ることにより、
 感染症リスクを軽減します！


動画配信中

詳しいご使用方法を動画で紹介しています！
 ぜひご覧ください

紹介動画
 QRコード



 YouTube アドレス: <https://youtu.be/byVfGuPdR68>

ご使用方法（正放線撮影）

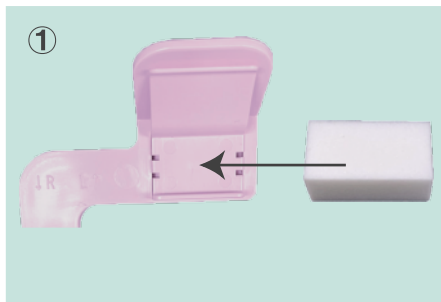


① インジケーターアームの
バイトピース装着部に
バイトピースを装着します

適度な弾力で、ズレや痛み
を防止します

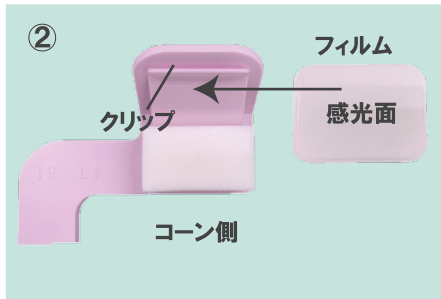

② フィルムもしくはIPの
感光面をコーン側に向け
て、クリップに挟んで固
定します

しっかりしたクリップ力
でフィルム等を保持し
ます

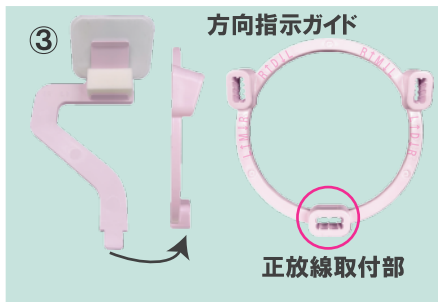

③ 方向指示ガイド

方向指示ガイドを取付ます

正放線撮影の場合は、
刻印のない左側の取付部
に取り付けます

その他の取付部は、動画
でご紹介しています



④


唾液感染予防袋(ワイド)
を取り付けます

フィルムやIPのカバーにも
唾液や血液が付着しづら
いので、撮影後は廃棄す
るだけでスキャン、現像作
業が衛生的に行なえます

詳しいご使用法は、当社ホームページやYouTubeで紹介しています！

関連製品のご紹介

唾液感染予防袋(ワイド)

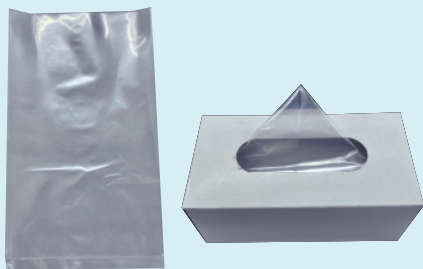

IPカバーに
唾液が付かず、
衛生的に
現像処理が
できます！

1箱 500枚入

※単回使用です
(クラス I 28B3X00009000051) 希望小売価格 2,000円 (税込2,200円)

バイトピース



マルチアングル
インジケーター
に取り付けて
使用します

1箱 200PCS入 (重量計数)

※単回使用です
(クラス I 28B3X00009000048) 希望小売価格 1,000円 (税込1,100円)

口内法撮影用 IP 保護カバー 特許取得済

製品名 フラットバック

テープを使わないので
簡単にIP長持ち！



外袋

イメージングプレート
(※付属されていません)


内袋

0型A 22mm × 31mm 0型B 22mm × 35mm
1型 24mm × 40mm 2型 31mm × 41mm

各サイズ対応！

※単回使用です
(クラス I 28B3X00009000026) 希望小売価格 500組入 6,000円 (税込6,600円)

熱シール式IPカバー

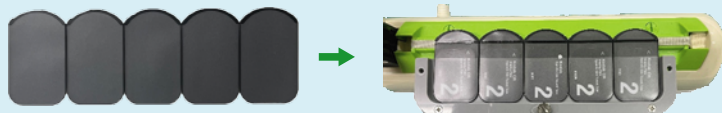

シーリング位置

感光面 裏面

5枚まとめてシールできるので作業効率アップ！
シーラー台もお問い合わせください！

サイズ 0A (22mm×31mm) サイズ 0B(22mm×35mm)
サイズ 2 (31mm×41mm) 5枚×100シート入

※単回使用です
(クラス I 28B3X00009000046) 希望小売価格 500枚入 6,000円 (税込6,600円)

ご使用上の注意

マルチアングルインジケーターは滅菌したものをお使いください バイトピースは消毒して、ご使用ください
バイトピース、唾液感染予防袋(ワイド)、フラットバック、熱シール式IPカバーは単回使用です 再使用はしないでください
破損、変形したものは使用しないでください 誤飲防止の為、使用時は、廃棄まで管理してください

製品の仕様、価格は予告なく変更する場合があります 最新の情報はお問い合わせください

製造販売元 **flat** 株式会社 **フラット**

本社 〒658-0023 神戸市東灘区深江浜町141-4
TEL 078-412-2345 FAX 078-412-2028
URL: http://www.k-flat.co.jp

東京営業所 〒123-0862 東京都足立区血沼2-13-13
TEL 03-3857-9271 FAX 03-3857-9272

仙台営業所 〒981-3215 宮城県仙台市泉区北中山1-1-23
TEL 022-376-8020 FAX 022-376-8021

ホームページから
お気軽にお問い合わせ
ください！
製品紹介ページ



お求めは、販売店までお問い合わせください